

Safe-T-Pro Uno

Submitted by Superadmin on October 18, 2016 - 3:35pm

El dispositivo de punción Accu-Chek® Safe-T-Pro Uno es seguro e higiénico. Brinda una punción ergonómica en solo 3 milisegundos y otras características de seguridad que previenen punciones accidentales. La profundidad predeterminada de la punción hace que el dispositivo esté listo para ser utilizado de inmediato.

Product Image:



Product Hero:

Main title:

Accu-Chek® Safe-T-Pro Uno

Hero product image:



Content Position:

Content on left and image on right

Background Color Position:

Right to left

Product Hero description:

Hero Area Background color:

#785bbd

#a087dc

Button text color:

#ffffff

Button border color:

#ffffff

Hero Area Background Type:

Color

Link is:

Internal Link

Button title:

Aprende Más

Component:

Component title:

Accu-Chek® Safe-T-Pro Uno

Component icon:



Content title:

Características

Short description:

Description:

- Listo para utilizar, con una configuración predeterminada de profundidad
- Tecnología Safe-T garantiza que la aguja se encuentra encapsulada y se retrae automáticamente
- Al mantener la aguja almacenada, se previenen punciones accidentales
- Ergonómico y sencillo de sujetar para una manipulación segura
- Higiénico; cada lanceta solo puede ser utilizada una vez
- Aguja biselada y diámetro pequeño para que la obtención de muestras de sangre sea prácticamente indolora
- Apto para personas zurdas y diestras
- Luego de un único uso, se desecha el dispositivo de punción completo

Background image:



Component Left Content:

Display Heading:

Uso profesional

Display value:

Apto para personas zurdas y diestras

Display Heading:

Higiénico

Display value:

Luego de un único uso, se desecha el dispositivo de punción completo

Component Heading Right:

Especificaciones

Additional Specs:

Display Heading:

Configuración predeterminada de profundidad

Display value:

Sí

Display Heading:

Profundidad de penetración

Display value:

1,5 mm

Display Heading:
Diámetro de la aguja
Display value:

0,36 mm (28 G)

Display Heading:
Corte especial de la aguja
Display value:

3 cortes

Display Heading:
Aguja siliconada
Display value:

Sí

Display Heading:
Esterilidad
Display value:

4 años después de que se esterilizó el producto

Display Heading:
Un solo uso
Display value:

Sí

Display Heading:
Retracción automática de la aguja
Display value:

Sí

Display Heading:
Manipulación intuitiva
Display value:

Sí

Display Heading:
Accesorios
Display value:

Presentación de lancetas Accu-Chek® Safe-T-Pro Uno

- Accu-Chek® Safe-T-Pro Uno x 200

Other features title:
Utilización

Other features content:

Punción simple, en dos pasos

1. Gire la tapa de esterilidad y retírela.
2. Sostenga el dispositivo de punción con los dedos pulgar, índice y mayor. Presione el dispositivo de punción con firmeza en el sitio elegido para realizar la punción. Utilizando el pulgar, presione el botón de mando hasta el fondo. Retire el dispositivo de punción del sitio donde se realizó la punción y deséchelo.

[Uso fácil Accu-Chek® Safe-T-Pro Uno](#)

Por favor, para más información acerca de cómo utilizar tu dispositivo de punción, consulta el manual del usuario de Accu-Chek® Safe-T-Pro Uno o llámanos al 800 471 800.

Content Position:

Left

Button text:

[Ver detalles del producto](#)

Button text color:

#ffffff

Button border color:

#ffffff

Gradient Color Position:

Left to right

Product Category:

[Dispositivos de Punción](#)

Related Products:

Performa

Brand Name:

Accu-Chek®

Short description:

- Dispositivo de punción profesional
- Higiénico: las lancetas se utilizan una sola vez, sin necesidad de ver o manipular la lanceta
- Punción rápida y prácticamente indolora

Title:

Accu-Chek Safe-T-Pro Uno

Support Image:



Product Support:

Yes

Product manual:

[Detail Page](#)

Product bar color:

#785bbd

Support hero area color:

#785bbd

#a087dc

Support hero area type:

Color