

**ACCU-CHEK®**  
Connect

# Instalación Sistema Web Accu-Chek® Connect

Utiliza el poder de tu dispositivo móvil  
y de la web para controlar tu diabetes.

EMPECEMOS





## Instala la aplicación gratuita Accu-Chek<sup>®</sup> Connect

Descárgala desde la App Store  
o Google Play según el dispositivo  
que tengas.





## Sincroniza el medidor

Sigue las instrucciones y crea una cuenta en línea en [www.accu-chek.cl/connect](http://www.accu-chek.cl/connect)

CREAR CUENTA








3

Siga paso a paso  
las siguientes  
instrucciones


a) En la pantalla inicial  
seleccione el botón “menú”

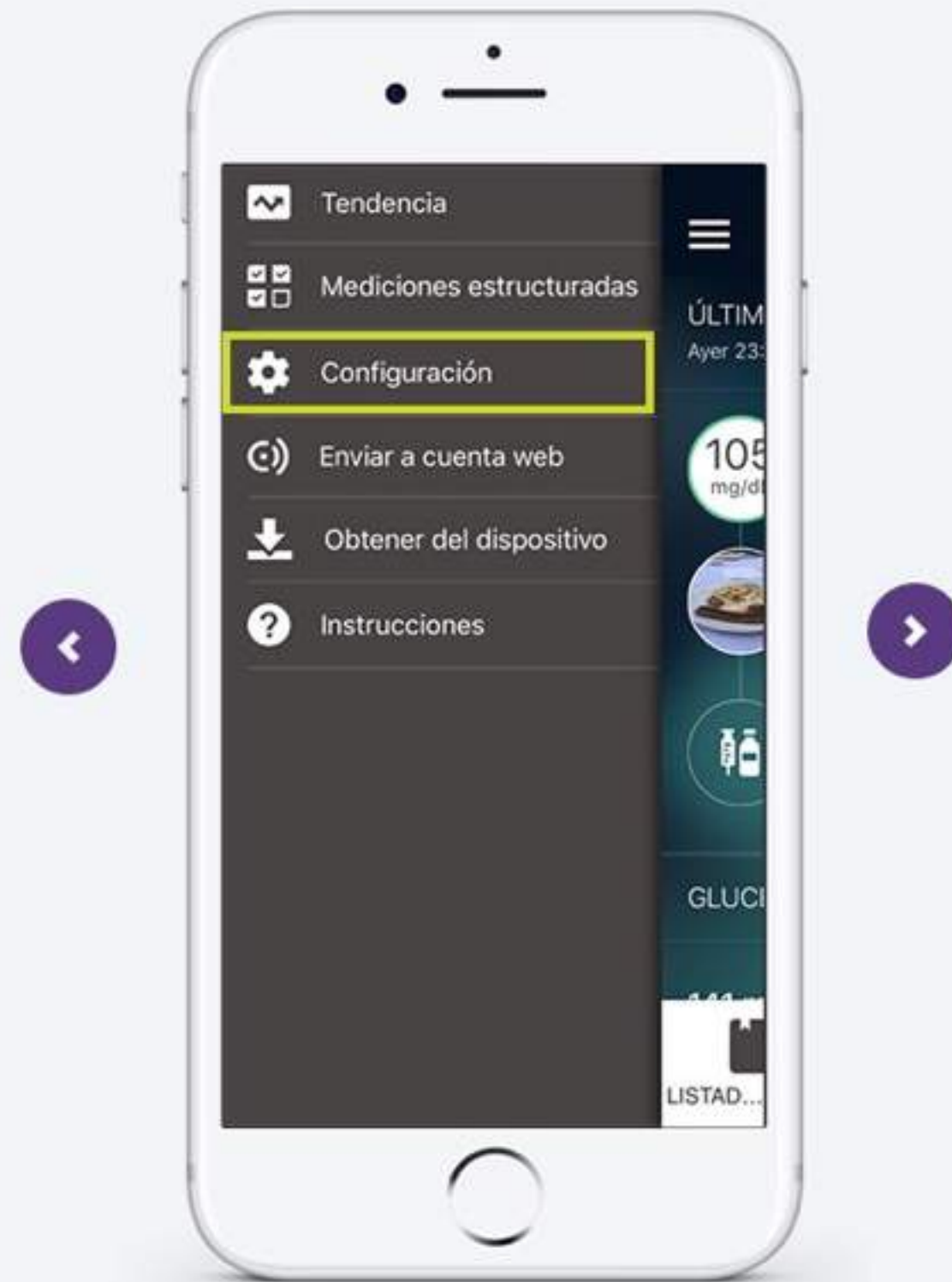

b) Presione "Configuración"

3


Siga paso a paso  
las siguientes  
instrucciones

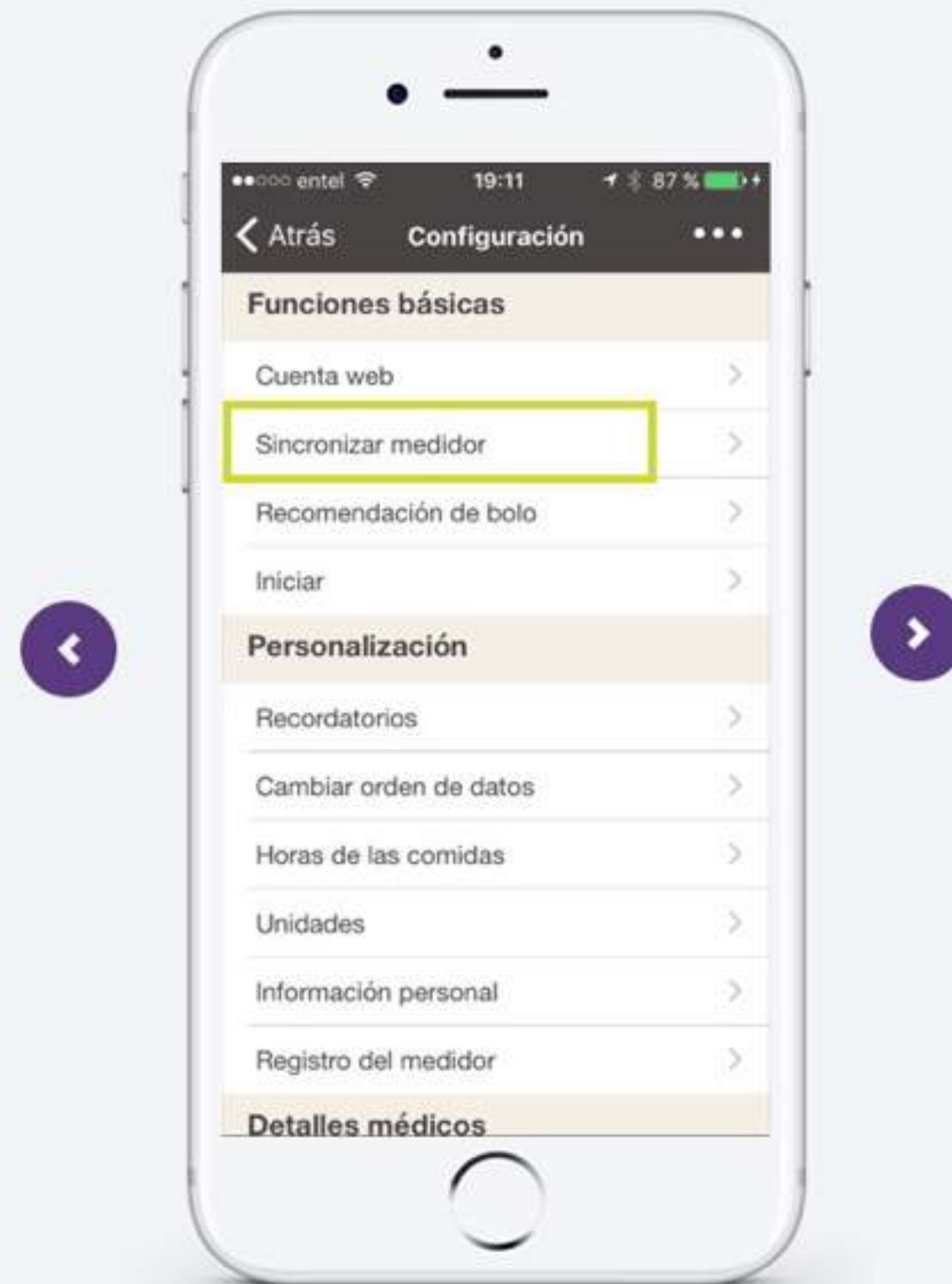

c) Presione  
“Sincronizar medidor”

3

Siga paso a paso  
las siguientes  
instrucciones

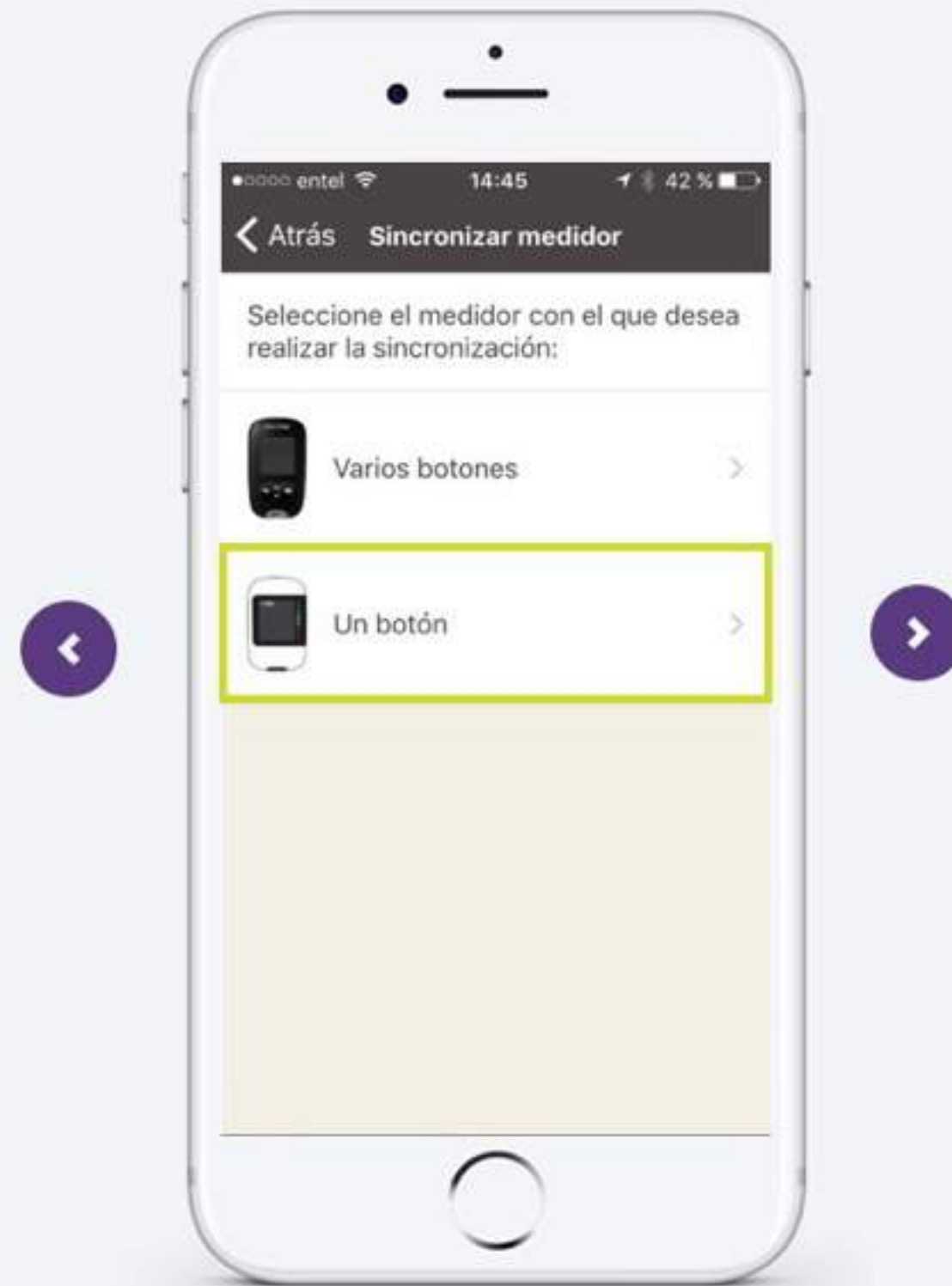


d) Seleccione "Un botón"

3

Siga paso a paso  
las siguientes  
instrucciones



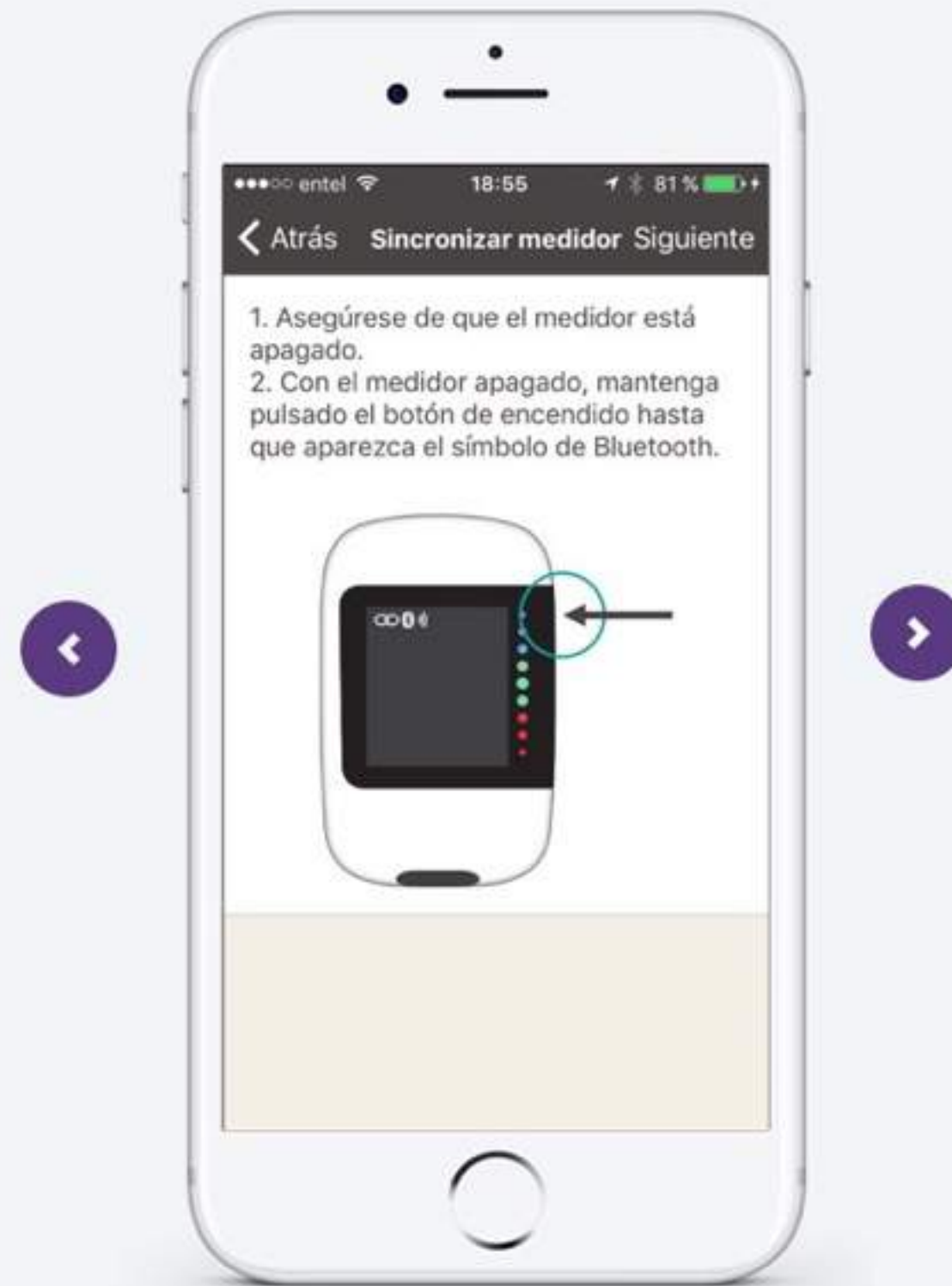

3

Siga paso a paso  
las siguientes  
instrucciones

e) Siga las instrucciones  
en pantalla





3

Siga paso a paso  
las siguientes  
instrucciones

f) Siga las instrucciones  
en pantalla

## iListo!

Ya puede ingresar y compartir la información sobre sus controles de glicemia con su equipo médico.





## Dispositivos compatibles



La aplicación para el tratamiento de la diabetes Accu-Chek® Connect es compatible con los dispositivos siguientes que utilizan iOS versión 9 ó 10:

iPad 3  
 iPad 4  
 iPad Air  
 iPad Air 2  
 iPad mini  
 iPad mini 2  
 iPad mini 3  
 iPad mini 4  
 iPhone 4s  
 iPhone 5  
 iPhone 5c  
 iPhone 5s  
 iPhone 6  
 iPhone 6 Plus  
 iPhone 6s  
 iPhone 6s Plus  
 iPhone SE  
 iPhone 7  
 iPhone 7 Plus



La aplicación para el tratamiento de la diabetes Accu-Chek® Connect es compatible con los teléfonos siguientes que utilizan Android versión 4.4, 5.0, 5.1 ó 6.0:

**Google Nexus**

Nexus 5X  
 Nexus 6  
 Nexus 6P  
 Pixel  
 Pixel XL

**HTC**

One M9

**Huawei**

Huawei Y6 Pro  
 Huawei P9  
 Huawei P9 Plus

**LG**

G3  
 G4  
 G5  
 LG Optimus L70

**Motorola**

Moto G4

**OnePlus**

3

**Samsung**

Galaxy S 3  
 Galaxy S 3 Neo  
 Galaxy S 4  
 Galaxy S 4 Active  
 Galaxy S 4 mini  
 Galaxy S 5  
 Galaxy S 5 Active  
 Galaxy S 5 Mini  
 Galaxy Note 5  
 Galaxy S 5 Sport  
 Galaxy S 6  
 Galaxy S 6 Active  
 Galaxy S 6 Edge  
 Galaxy S6 Edge +  
 Galaxy S7  
 Galaxy S7 Edge  
 Galaxy S8  
 Galaxy S8 Plus  
 Galaxy Note 7  
 Galaxy Note Edge  
 Galaxy Note 2  
 Galaxy Note 3  
 Galaxy Note 4  
 Galaxy Alpha  
 Galaxy K Zoom  
 Galaxy Core 2  
 Galaxy Ace 4  
 Galaxy A3  
 Galaxy A3 (2016)  
 Galaxy A5 (2016)  
 Galaxy A5 (2017)  
 Galaxy Core Prime  
 Galaxy J1 Mini  
 Galaxy J1 (2016)  
 Galaxy J2  
 Galaxy J3 (2016)  
 Galaxy J7

**Sony**

Xperia Z3

**Vodacom**

Smart Kicka